



Інцидін Ліквід®

ШВИДКОДІЮЧИЙ СПИРТОВИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Засіб застосовується всюди, де є потреба в швидкодіючій дезінфекції та швидкому висиханні поверхонь у приміщеннях та поверхонь медичного обладнання

- ▲ не містить альдегідів
- ▲ висихає, не залишаючи слідів
- ▲ має приємний запах



Властивості	Переваги
Широкий спектр дії. Засіб має бактерицидні (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидні (включаючи збудників парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу, рота- і аденовірусів), фунгіцидні властивості (включаючи гриби роду Candida).	Безпечна, гарантована дезінфекція всіх поверхонь, не чутливих до дії спирту, в тому числі, на ділянках підвищеного ризику.
Оптимально підібраний склад, що використовує синергійну дію окремих активних речовин.	Добре покриває поверхню, що піддається дезінфекції, швидко висихає, не залишаючи слідів.
Не містить альдегідів.	Добре переноситься користувачами.
Приємний запах.	Дає відчуття свіжості.
Готовий для застосування засіб.	Легке застосування, можливість негайного використання.
Короткий час знезараження.	Швидко забезпечує безпеку пацієнтам та медичному персоналові.
Висока активність засобу.	Не призводить до виникнення стійких до засобу штамів бактерій.
Клінічно та дерматологічно протестований	Можливість застосування для невеликих за площею поверхонь та важкодоступних поверхонь у приміщеннях, а також, предметів, обладнання, устаткування з гальванічним та полімерним покриттям, виготовлених зі скла, гуми та інших корозійно нестійких та корозійно стійких матеріалів, стійких до дії спирту.

Результати мікробіологічних та вірусологічних досліджень	
Застосування (нерозчинений засіб)	Експозиція (хв.)
Швидка дезінфекція поверхонь без механічного очищення згідно вимог DGHM (Німецьке товариство гігієни та мікробіології), методика 2001 р.	1 хв.
Дезінфекція при бактеріальних інфекціях (крім туберкульозу)	0,5 хв.
Дезінфекція при туберкульозі ²	1 хв.
Антивірусна дія відносно вірусів гепатиту В, С ВІЛ/СНІДу, ротавірусів.	1 хв.
Ефективність проти грибів роду Candida	1 хв.
Профілактична дезінфекція	0,5 хв.

Сфера застосування:

Засіб призначений для швидкої у часі дезінфекції невеликих за розмірами та важкодоступних поверхонь приміщень (дверних ручок, вікон, підвіконь, перил, поручнів тощо); предметів умеблювання та медичного інвентарю (ліжка, стоматологічні крісла, столики для медичного інструментарію, телефони, касові апарати тощо); медичного обладнання, устаткування, (включаючи стоматологічне), апаратури (предмети, деталі та вузли медичного обладнання, устаткування та апаратури); предметів догляду хворих (термометри, грілки, міхури для льоду, гребінці, тощо); іграшок; гумових рукавичок; перукарського та косметологічного знаряддя, предметів побуту.

Спосіб застосування:

Розчин вже є готовим до застосування. Поверхні рівномірно зрошують (використовуючи розпилювач) з відстані 30 см (при нормі витрат близько 40 мл на 1 кв. м) або протирають ганчіркою, змоченою засобом до повного змочування та залишають до висихання. При проведенні дезінфекції електроприладів, необхідно перевірити, чи відключено прилад від електромережі.

Висновки експертів:

Здійснено чисельні мікробіологічні, вірусологічні, токсикологічні та екологічні дослідження засобу. Засіб клінічно та дерматологічно протестований.

CE 0297

Виключно для професійного застосування.

Склад:

100 гр. засобу "Інцидін Ліквід" містить: діючі речовини: 2-пропанол – 35%, 1-пропанол – 25% допоміжні речовини: 1,2 – пропіленгліколь, натрій кокоамфоацетат, ароматизатор, демінералізована вода

Пакування		
Найменування	Кількість	Код
Пляшка 1 л	12 шт.	3041620
Розпилювач для пляшки 1 л	50 шт.	10005074
Каністра 5 л	2 шт. x 5 л	3041640



Виробник:

Ecolab GmbH & Co.OHG
Postfach 130406
D-40554, Düsseldorf
Deutschland

Представник в Україні:

ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Україна, 03148, м.Київ,
вул. Героїв Космосу, 4
Тел.: +38/044/494-31-20
факс: +38/044/494-31-21

