



## Медікарін

### ЯКЩО БАЖАЄШ БУТИ УПЕВНЕНИМ

Дезінфекційний засіб Медікарін - засіб з широким спектром дії, який містить хлор в якості активної речовини та який може знайти широке застосування в кожному медично - лікувальному закладі.

- ▲ високоефективна активна речовина
- ▲ засіб, легкий у застосуванні
- ▲ активний відносно органічних забруднень



Властивості	Переваги
Широкий спектр дії	Ефективна дезінфекція всіх поверхонь, призначених для миття.
Містить активний хлор	Перевірена активна речовина. Швидка дія завдяки малому часу знезараження відносно забруднень з високим вмістом органічних речовин.
Низька концентрація робочого розчину	Низька ціна робочого розчину.
У формі таблеток	Легке дозування, не вимагає застосування допоміжного дозуючого обладнання.
Широкий спектр застосування	Засіб застосовується в лікувально - профілактичних закладах усіх типів, дошкільних та шкільних дитячих закладах, на комунальних об'єктах та на транспорті, в аптечних закладах, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, харчової та переробної промисловості.
Стабільність робочого розчину	Термін придатності робочих розчинів засобу - 3 доби.

Результати мікробіологічних досліджень		
Спектр дії	Вміст хлору	Експозиція
Дезінфекція не забруднених органічними речовинами поверхонь та предметів	0,015-0,06%	30-60 хв.
Дезінфекція забруднених органічними речовинами поверхонь та предметів	0,06-0,03%	30-120 хв.
Знезараження транспорту, притирального інвентарю, ємностей для зберігання води	0,015-0,1%	45-60 хв.
Знезараження біорешток (крові, сечі, мокротиння, тощо)	0,2-0,3%	60-120 хв.

**Сфера застосування:**

- Для дезінфекції будь-яких поверхонь, які потребують миття, не забруднених органічними речовинами
- Для дезінфекції будь-яких поверхонь, які потребують миття, забруднених органічними речовинами.
- Для дезінфекції транспортних засобів, прибирального інвентарю та ємностей для зберігання води (цистерни, бочки, каністри, тощо)
- Для знезараження біорешток (крові, сечі, мокротиння, фекалій, тощо).

**Склад:**

Кожна таблетка масою 2,72 гр. містить 1,5 гр. активного хлору. 100 гр. засобу містять мас. %: 99,61 діхлороізоціанурату натрію та 0,39 алкілполілікольєфіру.

Пакування		
Банка	Коробка	Код
300 таблеток по 2,72 гр.	6 банок по 300 табл.	301729

**Спосіб застосування:**

Для сфери застосування ①:

Приготувати розчин засобу, розчинивши 1 табл. на 10 води (бактерицидна дія, за винятком туберкульозу) або 2 табл. на 10 л води (віруліцидна дія) або 4 табл. на 10 л води (фунгіцидна дія та при туберкульозі). Приготовленим розчином продезінфікувати поверхні або занурити у розчин предмети, що підлягають дезінфекції. Експозиція: 30-60 хв. в залежності від виду інфекції.

Для сфери застосування ②:

Приготувати розчин засобу, розчинивши 4 табл. на 10 води (бактерицидна дія, за винятком туберкульозу) або 7 табл. на 10 л води (віруліцидна дія) або 14 табл. на 10 л води (фунгіцидна дія та при туберкульозі). Приготовленим розчином продезінфікувати поверхні або занурити у розчин предмети, що підлягають дезінфекції. Експозиція: 30-120 хв. в залежності від виду інфекції.

Для сфери застосування ③:

Приготувати розчин засобу, розчинивши 1 табл. на 10 води (бактерицидна дія, за винятком туберкульозу) або 2 табл. на 10 л води (віруліцидна дія) або 4-7 табл на 10 л води (при туберкульозі та фунгіцидна дія). Приготовленим розчином продезінфікувати поверхні або занурити у розчин предмети, що підлягають дезінфекції. Експозиція: 45-60 хв. в залежності від виду інфекції.

Для сфери застосування ④:

Біорештки, що підлягають знезараженню, залити робочим розчином у спів-відношенні 2:1, розчинивши 14 табл. засобу в 10 л води (бактерицидна дія, за винятком туберкульозу та віруліцидна дія) або 20 табл. (при туберкульозі). Експозиція: 60-120 хв. в залежності від виду інфекції.

Свідцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу МОЗ України № 000594 від 26.05.2009 р.

Виключно для професійного застосування.



ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ				
Вміст активного хлору, %	Кількість таблеток на 10 літрів води	Спектр дії	Експозиція	Застосування
0,015	1	Бактерії (за винятком мікобактерій)	30 - 60 хв.	Дезінфекція поверхонь
0,03	2	Бактерії, мікобактерії, віруси	30 - 60 хв.	Дезінфекція поверхонь
0,06	4	Бактерії, мікобактерії, віруси, грибки	15 - 60 хв.	Дезінфекція поверхонь та органічні забруднення
0,1	7	Бактерії, мікобактерії, віруси, грибки	30 - 120 хв.	Органічні забруднення
0,2	14	Бактерії, мікобактерії та віруси	120 хв.	Органічні забруднення та біорештки (кров, мокротиння, сеча, тощо)
0,3	20	Бактерії, мікобактерії, віруси, грибки	60 - 120 хв.	Біорештки (кров, мокротиння, сеча, тощо)

**Виробник:**  
Ecolab GmbH & Co. OHG  
Postfach 130406, D-40554 Düsseldorf  
Tel.: +49 / 0211-9893-0, Fax: +49 / 0211-9893-384

**Представник:**  
ТОВ "Еколаб ТЗОВ"  
03148, м.Київ, вул. Героїв Космосу, 4  
Тел.: 044 / 494-31-20, факс: 044 / 494-31-21

